

نکات مهم در مورد نگاهداشت بهینه دستگاه

- نصب، راه اندازی، آموزش و هرگونه تعمیرات دستگاه صرفاً باید توسط بخش فنی شرکت صورت گیرد.
- به صورت دوره ای، قسمت های مختلف دستگاه از جمله بدنه خارجی، صفحه نمایش، کانکتورها و کابل ها را باز بینی نموده از سلامت آنها اطمینان حاصل نمایید. وجود هرگونه مشکلی را به بخش فنی شرکت اعلام نمایید.
- دستورالعمل های مربوط به **setup** اولیه دستگاه باید مطابق با آموزش های داده شده توسط نماینده شرکت رعایت شود. در صورت نمایان شدن پیغام خطا بر روی پنل دستگاه، عمل را متوقف کرده و پس از مراجعه به دستورالعمل مربوطه در دفترچه راهنما و در صورت حل نشدن مشکل با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.
- دستگاه نباید در مجاورت مواد بیهوشی قابل اشتعال استفاده شود.
- برای جابجایی دستگاه، پس از باز کردن قفل چرخ ها، آن را بوسیله دسته تعبیه شده بر روی پایه مخصوص دستگاه، با احتیاط هل دهید و از کشیدن آن توسط کابل، صفحه نمایش و یا پایه سرم خودداری نمایید.
- دقت کنید سرم و مایعات دیگر روی دستگاه، پدال و بخصوص کانکتورها نریزد.
- پروب ویتروکتومی نباید خارج از مایع کار کند.
- اگر دهانه پروب کاملاً باز و بسته نمی شود و یا ساکشن صورت نمی گیرد، از آن استفاده ننمایید.
- هنگام وصل کردن تیپ به هندپیس دقت نمایید که تیپ شل و یا بیش از حد محکم نباشد. برای اینکار فقط از آچار مخصوص استفاده نمایید.
- هرگز پدال را از طریق کابل آن بلند نکنید. دقت کنید کابل پدال تحت پیچش و یا فشار نباشد و همچنین از رد کردن دستگاه ها و میز از روی کابل خودداری نمایید.
- سرم را فقط به پایه سرم و آویز مخصوص دستگاه متصل نمایید.
- دقت کنید هنگام عمل، کیسه تخلیه بیش از حد (500 میلی لیتر) پر نشود.
- پک های استریل شده تنها برای یکبار مصرف تعبیه شده اند. لذا از استفاده مجدد آن ها بپرهیزید. بدیهی است هرگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست از مصرفی ها و مشکلات پیش آمده ناشی از آن، به عهده مصرف کننده می باشد.
- مادامی که هر کدام از مخزن های کاست، محتوی مایع می باشد، از **prime** کردن آن جداً خودداری نمایید.

- از لوازم جانبی و مصرفی غیر از آنچه توسط کمپانی، برای این دستگاه طراحی شده، استفاده نکنید. استفاده از لوازم متفرقه، میتواند باعث بروز خطرات و خرابی دستگاه شود.
- از عدم گرفتگی و خم شدگی تیوب ها در تمام مراحل عمل اطمینان حاصل نمایید.
- در صورت مخدوش بودن بسته بندی لوازم مصرفی، شرکت را مطلع فرمایید و شماره سریال (لات نامبر) درج شده روی بسته بندی را جهت پیگیری های بعدی، اعلام نمایید.
- پس از پایان عمل ها در آخر روز، کابل ها، هندپیس ها و... را طبق دستور العمل مربوطه تمیز نمایید.
- پدال را در محفظه مربوطه دستگاه قرار دهید. دقت نمایید کابل آن پیچ نخورده و تحت فشار نباشد.
- کابل برق دستگاه را از پریز جدا نموده و بصورت صحیح طوری که تحت فشار نباشد، پشت دستگاه جمع نمایید.
- در صورت تمایل می توانید دستگاه، پدال، صفحه نمایش و کنترل را با ابری که به الکل، آب و صابون رقیق و یا مواد ضد عفونی کننده غیر خورنده آغشته است، تمیز کنید. هرگز از حلال ها و ساینده ها استفاده نشود.
- در پایان روز، کاور مخصوص دستگاه را روی آن بکشید.